



Användarinstruktion för Diphoterine®

För behandling av stänk av kemikalier på hud eller i ögon

PÅBÖRJA SKÖLJNING INOM EN MINUT



Sköljning påbörjas inom 10s




Använd
1 SIEW
50ml

Sköljning påbörjas först efter 10s




Använd
1 Flaska
500ml

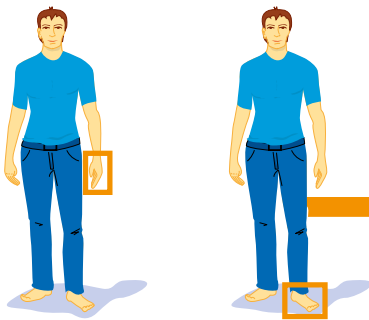

3% av
kroppsytan



Använd
1 MICRO
100ml

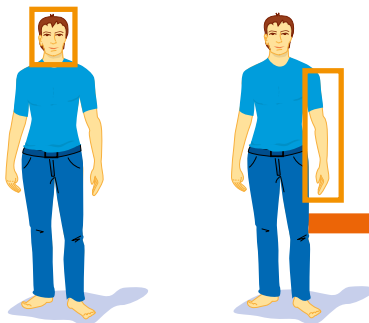

9% av
kroppsytan



Använd
1 MINI
200ml



> 9% av
kroppsytan



Använd
1 DAP
5L

* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.

Användarinstruktion för Diphoterine®*

Påbörja sköljning **inom en minut** efter det att olyckan inträffat, prioritera de **oskyddade kroppsytorna**.

Avlägsna kläder och/eller kontaktlinser.

Fortsätt omedelbart med behandlingen av de nu **blottlagda kroppsytorna**.

Ta ej på kläder igen som utsatts för stänk av kemikalien eller som blivit våta av sköljningen.

Kontakta läkare.

GENERELLA INSTRUKTIONER

Fördröj aldrig påbörjandet av behandlingen

För optimalt resultat, använd Diphoterine® som första behandlingsmetod.

Använd hela innehållet i behållaren.

Om Diphoterine® inte finns att tillgå initialt, använd vatten och skölj sedan med Diphoterine® så fort som möjligt.

Om behandlingen påbörjas **efter en minut**, förläng sköljningen av den utsatta ytan med Diphoterine® med 3 till 5 minuter gånger tiden som hunnit passera innan sköljningen påbörjades.

I fallet med en fördröjd påbörjad sköljning av stänk i ögat, så är det ej nödvändigt att fortsätta sköljningen längre än 15 minuter.

Kontakta sedan läkare omedelbart

Efter behandling av ögat, kan **Natriumklorid vätska** användas för att underlätta en snabbare återhämtning av ögat till dess fysiologiska normaltillstånd.

Om **munhålan** utsatts för stänk av kemikalien, skölj munnen med Diphoterine® och spotta sedan ut det.

Om **hörselgången** utsatts för stänk av kemikalien, skölj så fort som möjligt med Diphoterine® genom att spruta in 500ml i hörselgången och samtidigt luta huvudet åt ena sidan för att möjliggöra för vätskan att flöda ut ur örat.

Som i samtliga fall med ensidig sköljning av ett öra med en rumstempererad vätska, så kan yrsel uppstå. Det är ej farligt och kommer att försvinna inom ett par minuter.

Behållare	Rekommenderad behandlingstid
SIEW (50ml)	30 sekunder
Micro (100ml)	50 sekunder
Mini (200ml)	1 min 30 sekunder
Flaska (500ml)	3 minuter
DAP (5L)	5 minuter



PREVOR

ANTICIPATE AND SAVE

Toxicology Laboratory & Chemical Risk Management

* Begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium. Hexafluorine® rekommenderas för detta ändamål.